

Précautions à prendre pendant l'été pour les utilisateurs d'implant cochléaire

La baignade et autres activités nautiques

Pour toute activité impliquant l'immersion de l'audio processeur, il est impératif d'utiliser la pochette étanche WaterWear, spécialement dédiée aux systèmes MED-EL pour les activités en eau chlorée, douce ou salée.

Le WaterWear est une pochette étanche réutilisable (jusqu'à 9 utilisations) qui recouvre intégralement l'audio processeur (y compris l'antenne pour les processeurs SONNET et OPUS 2). La pochette est fermée à l'aide d'une bande adhésive. Veillez à bien installer le WaterWear en suivant la notice d'utilisation afin d'assurer une étanchéité complète.

L'utilisation du WaterWear nécessite une alimentation par piles alcalines, à l'oxyde d'argent ou par batterie rechargeable (pas de pile zinc-air). MED-EL vous recommande d'utiliser une fixation complémentaire dans l'eau ou pour toute autre activité sportive (bandeau, bonnet de bain etc...). Pour SONNET : il est recommandé d'utiliser le mode omnidirectionnel du microphone.

Le WaterWear est disponible pour les processeurs SONNET, SONNET EAS, RONDO 2, RONDO et OPUS 2.

Lire attentivement la notice d'utilisation du WaterWear.

Ne pas laisser un enfant jouer ou utiliser le WaterWear sans la supervision d'un adulte.

Retrouvez la vidéo pratique du **WaterWear pour SONNET, EAS, OPUS 2** sur : <http://bit.ly/2tlj5B0>

Retrouvez la vidéo pratique du **WaterWear pour RONDO** sur : <http://bit.ly/2tcnYxL>

Activez les sous-titres et sélectionnez « Français ».



MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H

400 Av. Roumanille – CS 700 62
F-06902 Sophia-Antipolis Cedex
Tel: +33 (0)4 83 88 06 00 / Fax: +33 (0)4 83 88 06 01
Code APE: 2660Z - RCS Antibes: 820 526 309
TVA Intracom : FR 45-820526309

Société Générale
IBAN : FR76 3000 3015 7000 0200 3151 820
SWIFT/BIC – SOGEFRPP
www.medel.com

Activités sportives et maintien

Lors d'une activité sportive, il est possible d'utiliser l'ActiveWear pour déporter l'alimentation du processeur sur le vêtement et le maintenir en place.

Retrouver comment utiliser l'ActiveWear ici : <https://bit.ly/2GM7ZKr>

Pour les plus petits, le BabyWear permettra de déporter la totalité du processeur sur le vêtement et d'assurer le maintien toute la journée.

Retrouvez comment utiliser le BabyWear ici : <https://bit.ly/2s4uKoh>



Voyages en avion

Avant de passer les portiques de sécurité (détecteur de métaux), éteignez et enlevez l'audio processeur, et présentez votre carte de porteur d'implant au personnel responsable. Dans l'avion, prévenez le personnel de bord qui pourra vous demander d'éteindre votre audio processeur pour le décollage et l'atterrissage.

Entretenir son audio processeur

L'été peut être générateur d'humidité et de transpiration. N'oubliez pas de sécher tous les soirs votre audio processeur dans le déshumidificateur et de nettoyer régulièrement les contacts de piles, les interstices et de changer le couvre-microphone tous les trois mois.

Précautions

- Ne laissez pas votre audio processeur en plein soleil ! Veillez à le stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Gardez votre carte de porteur d'implant en permanence, et conservez les réglages de votre audio processeur (sur clé USB) que vous emporterez avec vous à chaque réglage, ou lors de vos déplacements.
- Assurez-vous d'avoir du matériel d'avance (câble, piles, batteries chargées, etc...) afin de pouvoir vous dépanner en cas de besoin.
- Et enfin, assurez-vous d'emporter avec vous le numéro de notre service après-vente en cas de besoin !

04 83 88 06 00
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h00 à 13h00
De 14h00 à 17h00
office@fr.medel.com

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H

400 Av. Roumanille – CS 700 62
F-06902 Sophia-Antipolis Cedex
Tel: +33 (0)4 83 88 06 00 / Fax: +33 (0)4 83 88 06 01
Code APE: 2660Z - RCS Antibes: 820 526 309
TVA Intracom : FR 45-820526309

Société Générale
IBAN : FR76 3000 3015 7000 0200 3151 820
SWIFT/BIC – SOGEFRPP
www.medel.com