

Oticon Medical vous aide à préparer vos vacances en toute sérénité grâce à cette **Fiche Vacances** intégrant toutes les informations à connaître avant de partir !



Pack Sérénité


Vous pouvez souscrire un **Pack Sérénité** qui vous permet de louer un processeur de prêt durant vos vacances. *Contactez le Service Clients au moins 15 jours avant votre départ.*

Pensez à avertir votre compagnie d'assurance afin d'assurer votre processeur de prêt.

Si vous voyagez à l'étranger, Oticon Medical vous suit partout dans le monde en cas de besoin.

La carte ci-dessous expose la présence d'Oticon Medical dans le monde.

Pour obtenir les coordonnées précises, rendez-vous sur notre site www.oticonmedical.fr, rubrique « A propos d'Oticon Medical » > « Nous contacter »

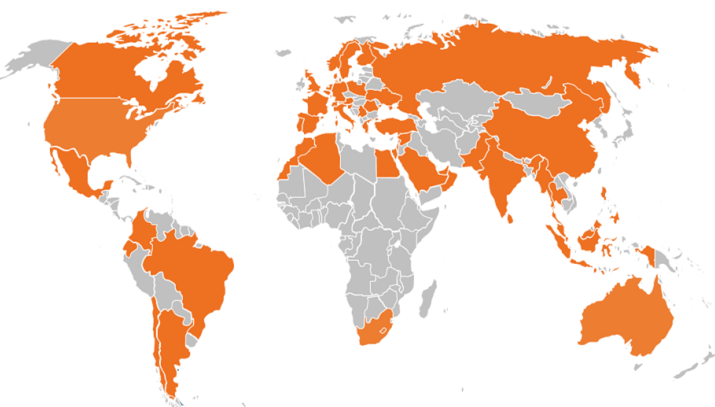

 Bureaux Oticon Medical –
Systèmes d'implants cochléaires

Pour contacter le Service Clients Oticon Medical



04.93.95.38.29

(Ligne Directe du lundi au jeudi: 8h30-18h00 –
le vendredi: 8h30-17h00)



Info-ic@oticonmedical.fr



Oticon Medical

2720 Chemin St Bernard
06220 Vallauris



www.oticonmedical.fr

Nouveau

Commandez en ligne vos accessoires
pour implants cochléaires*

<https://shop.oticonmedical.com/fr>



*réservée aux utilisateurs de processeurs Neuro One
et Saphyr® SP neo collection, sauf achat de piles (ouvert à tous).

Voyager en avion

N'oubliez pas de prendre et de présenter votre **carte de porteur** aux agents de sécurité lors du passage aux portiques de sécurité et d'éteindre votre processeur de son.

Vous pouvez prendre l'avion avec votre implant cochléaire, pensez seulement à **éteindre votre processeur de son** lors des phases de décollage et d'atterrissage de l'avion.



Que devez-vous prendre dans votre valise ?

Hormis votre crème solaire,
Prévoyez quelques accessoires de rechange !

Pensez à prendre :

- Un cordon d'antenne
- Une antenne avec aimant
- Des piles (anticipez vos besoins)
- Votre boîte de dessiccation chauffante avec ses pastilles de dessiccant (utiles pendant l'été!)
- Une boucle de maintien pour les activités sportives

Accessoires pratiques



La **housse clip** protège votre processeur de son de la transpiration et de l'humidité. Idéal pour les activités de plein air !



La **Trousse de rangement** conçue pour emporter tous les éléments essentiels de votre processeur. Pour transporter certains accessoires en un minimum de place, utilisez la trousse amovible !



Le **Silhouette** vous permet de connecter votre processeur de son à votre téléphone portable ou à votre lecteur MP3, utile pour les longs trajets.