

Conseils pour profiter de l'été

Baignade et autres activités nautiques

Pour toute activité impliquant l'immersion de l'audio processeur, il est impératif d'utiliser la pochette étanche WaterWear, spécialement dédiée aux systèmes MED-EL pour les activités en eau chlorée, douce ou salée.

Le WaterWear est une pochette étanche réutilisable qui recouvre intégralement l'audio processeur (y compris l'antenne pour les processeurs SONNET et OPUS 2). La pochette est fermée à l'aide d'une bande adhésive. Veillez à bien installer le WaterWear en suivant la notice d'utilisation afin d'assurer une étanchéité complète.



L'utilisation du WaterWear nécessite une alimentation par piles alcalines, à l'oxyde d'argent ou par batterie rechargeable (pas de pile zinc-air). MED-EL vous recommande d'utiliser une fixation complémentaire dans l'eau ou pour toute autre activité sportive (bandeau, bonnet de bain etc...). Ceci ne s'applique pas pour le RONDO 2 et RONDO 3 qui possèdent une batterie intégrée.

Pour l'EAS, veillez à préalablement enlever l'oreillette EAS.

Le WaterWear est compatible avec les processeurs SONNET 2, SONNET, SONNET EAS, RONDO 3, RONDO 2, RONDO et OPUS 2.

Lire attentivement la notice d'utilisation du WaterWear.

Ne pas laisser un enfant jouer ou utiliser le WaterWear sans la supervision d'un adulte.

Retrouvez les vidéos pratiques du WaterWear :

- pour SONNET 2 sur : <https://urlz.fr/fHIH>
- pour RONDO 3 sur : <https://urlz.fr/fHIU>
- pour RONDO 2 sur : <https://urlz.fr/fHIR>
- pour SONNET, EAS, OPUS 2 sur : <http://bit.ly/2tlj5B0>
- pour RONDO sur : <http://bit.ly/2tcnYxL>

Activez les sous-titres et sélectionnez « Français ».

Activités sportives et maintien



Lors d'une activité sportive, il est possible d'utiliser l'ActiveWear pour déporter l'alimentation du processeur sur le vêtement et le maintenir en place.

Retrouver comment utiliser l'ActiveWear avec SONNET 2 ici : <https://urlz.fr/fHIN>

Retrouver comment utiliser l'ActiveWear avec SONNET ici : <https://bit.ly/2GM7ZKr>

Pour les plus petits, le BabyWear permettra de déporter la totalité du processeur sur le vêtement et d'assurer le maintien toute la journée.


Retrouvez comment utiliser le BabyWear avec SONNET 2 ici : <https://urlz.fr/fHIL>

Retrouvez comment utiliser le BabyWear avec SONNET ici : <https://bit.ly/2s4uKoh>



Voyages en avion

Avant de passer les portiques de sécurité (détecteur de métaux), éteignez et enlevez l'audio processeur, et présentez votre carte de porteur d'implant au personnel responsable. Dans l'avion, prévenez le personnel de bord qui pourra vous demander d'éteindre votre audio processeur pour le décollage et l'atterrissage.

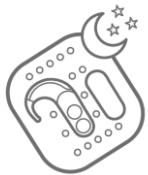

Entretien son audio processeur

L'été peut être générateur d'humidité et de transpiration. N'oubliez pas de sécher tous les soirs votre audio processeur dans le déshumidificateur et de nettoyer régulièrement les contacts de piles, les interstices et de changer le couvre-microphone tous les trois mois. **Notez bien : la déshumidification ne s'applique pas pour les processeurs RONDO 2 et RONDO 3 !**

Profiter des restaurants, restez en contact avec vos proches ou écouter le tube de l'été

Pour améliorer votre écoute dans des environnements difficiles comme les terrasses de restaurant, ou encore pour écouter la musique, allongé sur votre transat, vous pouvez utiliser plusieurs accessoires de connectivité.



Accessoire AudioStream : il s'agit d'un couvercle Bluetooth qui se place sur le boîtier d'alimentation du processeur (à la place du couvercle habituel) et diffuse le son d'un téléphone ou d'une tablette directement dans le processeur.

Pour l'utiliser : jumelez l'AudioStream à votre téléphone/tablette via l'application AudioKey 2 (à ne faire qu'une seule fois). Puis, faites glisser le couvercle AudioStream sur le boîtier d'alimentation de votre SONNET/SONNET 2. C'est tout !

AudioStream est uniquement compatible avec SONNET et SONNET 2.

Retrouvez toutes les vidéos de bon usage de l'AudioStream ici : <https://urlz.fr/fHJh>



Accessoire AudioLink : il s'agit d'un accessoire qui permet de diffuser le son d'un appareil externe (ex. téléphone, ordinateur, télévision) vers votre processeur, via la technologie Bluetooth ou par câble.

Pour téléphoner avec un téléphone Bluetooth : jumelez d'abord l'AudioLink à votre processeur puis au dispositif audio externe. Placez l'AudioLink près de votre bouche (accroché par exemple à votre vêtement). Puis passez votre appel normalement.

Pour écouter de la musique : assurez-vous que votre processeur est jumelé avec l'AudioLink. Connectez ensuite l'AudioLink au dispositif audio à l'aide du câble fourni. Sélectionnez la musique sur votre appareil audio et profitez ! Si vous ne souhaitez pas utiliser de câble, vous pouvez utiliser l'application Audio2Ear de MED-EL.

Pour regarder la télévision : assurez-vous que votre processeur est jumelé avec l'AudioLink. Connectez ensuite la station de l'AudioLink à votre téléviseur à l'aide du câble RCA fourni. Allumez la télévision.

Utiliser l'AudioLink comme microphone déporté (idéal dans les milieux bruyants) : assurez-vous que votre processeur est jumelé avec l'AudioLink. Appuyez sur le bouton MIC de l'AudioLink et placez ce dernier au centre de la table ou près de votre interlocuteur.

AudioLink est uniquement compatible avec SONNET 2, SONNET ou RONDO 3.

Retrouvez toutes les vidéos de bon usage de l'AudioLink ici : <https://urlz.fr/fHJH>

Pour les autres audio processeurs MED-EL (y compris SONNET 2, RONDO 3...), vous pouvez également utiliser une boucle magnétique tour de cou Bluetooth (ex. Artone 3 Max) qui se connecte sans-fil à votre téléphone ou tablette Bluetooth.

Précautions

- Nous vous recommandons de lire attentivement les manuels d'utilisation fournis avec votre processeur et vos accessoires.
- Ne laissez pas votre audio processeur en plein soleil ! Veillez à le stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Gardez votre carte de porteur d'implant en permanence, et conservez les réglages de votre audio processeur (sur clé USB) que vous emporterez avec vous à chaque réglage, ou lors de vos déplacements.
- Assurez-vous d'avoir du matériel d'avance (câble, piles, batteries chargées, etc...) afin de pouvoir vous dépanner en cas de besoin.
- Et enfin, assurez-vous d'emporter avec vous le numéro de notre service après-vente en cas de besoin :

04 83 88 06 00
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h00 à 13h00
De 14h00 à 17h00
office@fr.medel.com